

# Guide de prise en main rapide de la miniTek

## Fonctions

### Bouton Muet/Veille

Appuyez pendant plus de 3 secondes pour éteindre ou allumer vos aides auditives (mise en pause).

Appuyez pendant l'écoute d'un programme audio pour allumer ou éteindre les micros (muet).

### Bouton Téléphone

Appuyez pour répondre ou mettre fin à un appel.

Appuyez pendant 3 secondes environ pour refuser l'appel entrant.

Appuyez pendant 5 secondes environ pour lancer l'appairage de votre miniTek avec votre téléphone.

Appuyez deux fois pour reconnecter votre miniTek au téléphone.

### Bouton d'augmentation du volume

Appuyez pour augmenter le volume.

### Bouton de baisse du volume

Appuyez pour diminuer le volume.

### Bouton marche/arrêt de la miniTek

Appuyez pendant 3 secondes environ pour allumer ou éteindre la miniTek.

### Bouton source audio

Appuyez pour passer d'un programme d'écoute standard à une source audio externe.

Liste des sources audio externes :

1. Récepteur FM (DAI)
2. Entrée (prise stéréo 2,5 mm)
3. 1<sup>er</sup> Tek Transmitter
4. 2<sup>e</sup> Tek Transmitter
5. 3<sup>e</sup> transmetteur Bluetooth
6. Bobine téléphonique

### Bouton de changement de programme

Appuyez pour changer le programme d'écoute en cours.

Appuyez pour passer d'une source audio externe à un programme d'écoute standard.



## État du voyant de fonctionnement

miniTek allumée : LED clignotante

miniTek éteinte : LED éteinte

miniTek en chargement : LED clignotante

Batterie pleine : LED verte

Batterie presque vide : LED rouge

SIEMENS

# Guide Quick-Fit Connexx 6.4.5

Etape 1



## Configuration sans fil

Le bouton "configuration sans fil", en jaune, indique que les paramètres de la miniTek n'ont pas encore été programmés.

- ▶ Ouvrez la boîte de dialogue **Configuration sans fil**.
- ▶ Cochez la case **miniTek (activée, si la case n'avait pas été déjà cochée)**.
- ▶ Cliquez sur **OK** pour programmer la miniTek.



## 2<sup>e</sup> Tek Transmitter

- ▶ Vérifiez le **2<sup>e</sup> Tek Transmitter**.
- ▶ Entrez l'adresse Bluetooth du second transmetteur.

Etape 2



## Programmes d'écoute de la miniTek

- ▶ Choisir le programme d'écoute souhaité :

**Tek/miniTek (Audio/TV)** → Gain haute fréquence légèrement réduit

**Téléphone Bluetooth** (disponible uniquement dans le programme 2) → Gain haute fréquence légèrement réduit

**miniTek Téléphone** → Gestion très efficace de la parole et du bruit

- ❗ Les réglages d'usine du programme ont été optimisés pour améliorer le confort d'utilisation de la miniTek pour chaque situation ou mode Input indiqué.

Etape 3



## Mode Input de la miniTek

- ▶ Sélectionnez le mode Input souhaité :


**Tek/miniTek** (transmetteur Tek 1 et Transmetteur Bluetooth tiers ou connexion câble directe)

**Téléphone Bluetooth** (disponible uniquement dans le programme 2)

**miniTek FM** (il faut un récepteur FM, connecté à la miniTek)

**miniTek Telecoil**

- ❗ Chacun de ces modes Input ne doit être utilisé que pour un seul programme d'écoute.

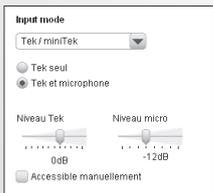

## Configuration d'entrée - Input mode

- ▶ Sélectionnez l'entrée audio souhaitée, puis choisissez le mode d'écoute voulu.

**Entrée audio uniquement**

**Entrée audio et microphone**

- ❗ On peut couper ou rallumer les micros de l'aide auditive pendant l'écoute audio. Appuyez sur le bouton Muet de la miniTek.

- ▶ Réglez le **Niveau source audio** et le **Niveau micro**.

- ❗ On peut régler le **Niveau source audio** et le **Niveau micro** indépendamment.

- ❗ Il est conseillé de laisser l'option **Accessible manuellement** désactivée pour tous les modes input de la miniTek. Appuyez sur le bouton Sources Audio de la miniTek pour passer du programme d'écoute standard à toutes les sources audio externes disponibles.

